

トリプル除菌剤配合

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント^{プラス}

IPMP

Ag⁺

+

CPC

Smile Dent

カンジダ菌
除菌率※
99.99%

※40℃・5分で99.99%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

イメージ写真

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

Smile Dent^{プラス}

部分入れ歯 兼用 総入れ歯

ノンクラスプ入れ歯

強力除菌
ニオイ除去

酵素配合
発泡洗浄

防サビ剤入
ミントの香り



48錠



120錠

※デザインはイメージです。



歯科医院専用 入れ歯洗浄剤 スマイルデントプラス

カンジダ菌
除菌率※
99.99%

※40℃・5分で99.99%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

トリプル除菌剤 配合

- Ag⁺** アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。
- CPC** 塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。
- IPMP** イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で歯磨剤などにも使用されています。

さらに金属の 変色を防ぐ処方

防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)を新配合

- 部分入れ歯の割合も増えており、金属床入れ歯は保険適用となっています。
- 金属への影響(変色等)を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。

※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

約150~200mLに 対し錠剤 1 錠

- 部分入れ歯の割合も増えて、300mL も必要としない状況があります。
- 市販の入れ歯洗浄ケースの容量も、200mLのものが多いです。

特 長

- ① 強力除菌 ※** 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- ② ニオイ除去** 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを消します。
- ③ 酵素配合** 酵素がしつこい汚れも取り除きます。
- ④ 発泡洗浄** 発泡洗浄し、漂白できます。
- ⑤ 防サビ剤入** 入れ歯の金属部分の変色・変質を防ぎます。
- ⑥ ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯 ハンク拉斯プ入れ歯


部分入れ歯



総入れ歯



ハンク拉斯プ入れ歯

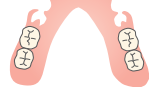


成 分 発泡剤(炭酸塩、クエン酸)、漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、漂白活性化剤(TAED)、ポリリン酸塩、酵素、防錆剤、結合剤、流動改善剤、色素、香料

液 性 中性

使用方法

- ① 約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。**

※60℃以上のお湯で使用しないでください。
入れ歯が変色、変形することがあります。
※水温が低いと発泡力が弱くなりますので、40~50℃のお湯を使うことをおすすめします。

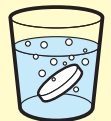

- ② すぐに入れ歯を浸してください。**

※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
※特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。



- ③ 洗浄後は水でよくすすいでください。**

※ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。



■48錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥750 患者様参考税抜価格 ¥920
■120錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥1,250 患者様参考税抜価格 ¥1,550

本紙に掲載されている価格は2026年8月21日のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。