

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
TDV アイソテープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	ブラジル
製造業者	TDV DENTAL LTDA (ティーディーブイ デンタル エルディーディーエー社)

【形状・構造及び原理等】

サイズ:幅 18mm、厚さ 0.07mm、長さ 5m
カラー:ライトブルー
材質:テフロン(ポリテトラフルオロエチレン)

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は口腔内で充填材又は修復材等を適用する際に用いる。

【使用方法等】

- (1)本品を必要な長さにカットします。



- (2)本品を歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付けます。



[使用方法における使用上の注意]

- ①使用後は本品を取り外すこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
- ①単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性があります。
- ②本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。