



歯科用隣在歯隔離用テープ

T D V アイソテープ



臨床写真ご提供：YOKOTA DENTAL OFFICE 横田 真一 先生

撥水性に優れた歯科用テフロンテープです。



材質：テフロン
サイズ：幅 18mm、厚さ 0.07mm、長さ 5m
カラー：ライトブルー

歯科医院様参考価格 **¥1,400**

- エッチング材、接着材、コンポジットレジンなどの適用時に、患歯と隣在歯とを隔離し、侵襲を避けたい部位を保護します。
- 耐薬品性に優れた材質で、口腔内使用を目的として設計開発しています。
- 歯間部への挿入が容易な厚さで、柔軟性があり、操作中のテープ同士の粘着を防止し、隣在歯にしっかりと適合します。

アイソテープ 使用方法



テープを必要な長さにカットします。



テープを歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付けます。

アイソテープ ご使用例



術前。
コンポジットレジン修復による上顎中切歯間の空隙閉鎖を計画。



ラバーダム（Nic Tone ラバーダムラテックスシート：ミディアム・ブラック）を装着して、アイソテープで隣在歯を保護し、右上1の接着操作に移行。



バイオクリアーブラックトライアングルキット（上顎前歯ピンクS）設置後、フロアブルレジン充填。



反対側も同様の操作を行う。
術後。

臨床写真ご提供：田代歯科医院 田代 浩史 先生

II級窩洞修復用コンポジットレジン形成器

TDV コンタクト プラス ゴールド

2021年
6月21日（月）
新発売

ユニークな先端の形状をしたII級窩洞修復用コンポジットレジン形成器です。

先端の形状は遠心窩洞用と近心窩洞用があり、サイズはスモール（S）とラージ（L）の2種類があります。

スモール（S）




ラージ（L）

遠心窩洞用チップ




OD窩洞は、コンポジットレジン充填後、遠心窩洞用チップを挿入し、遠心方向に押します。

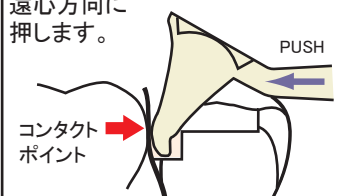

近心窩洞用チップ



MO窩洞はコンポジットレジン充填後、近心窩洞用チップを挿入し、近心方向に引きます。

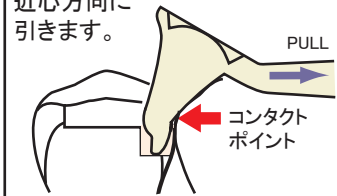


II級窩洞修復時に簡単・迅速にI級単純窩洞化できます。



窩洞形成します。通法に従って、マトリックスを適用し、接着処理後、チップの先端が包み込まれる程度の量のコンポジットレジン充填します。



チップを選択し、窩洞に挿入し、隣接面の方向に圧接します。集光レンズに光照射器ライトプローブを乗せ、光照射します。

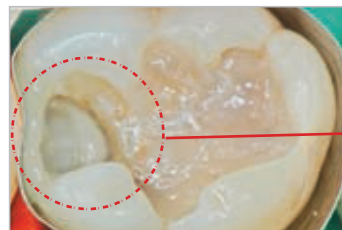

チップを引き抜き、コンポジットレジン隣接面形態が形成されていることを確認します。通法に従って、咬合面のコンポジットレジン充填します。


遠心窩洞用、近心窩洞用に設計された
先端チップ

近心窩洞用チップは近心側、遠心窩洞用チップは遠心側に向かって矢印表示があり、ハンドルに識別表示があります。


スモール 近心窩洞用 PULL MESIAL (S)	
スモール 遠心窩洞用 PUSH DISTAL (S)	
ラージ 近心窩洞用 PULL MESIAL (L)	
ラージ 遠心窩洞用 PUSH DISTAL (L)	

光照射器のライトプローブに対応
集光レンズ

集光レンズに光照射器ライトプローブを乗せ、光照射しますと、コンポジットレジンの深部まで光を到達させます。

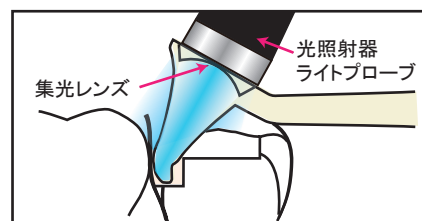にぎりやすい中央球体ハンドル
操作性抜群ハンドル

先端チップを隣接面に押したり、引いたりする際に適切な力を得ることができます。

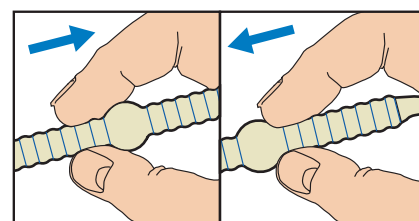

MO窩洞は引きます。 OD窩洞は押します。

TDV コンタクト プラス ゴールド
内容

・スモール（S）、ラージ（L） 各1本

歯科医院様参考価格 ￥6,600



コンポジットレジン形成器

TDV エステティックプラス

2021年
6月21日（月）
新発売

コンポジットレジン形成時に滑らかな平滑面を提供するシリコンチップです。

チップは8種類あり、ハンドルはストレートハンドルと角度付きのユニバーサルハンドルの2種類あります。

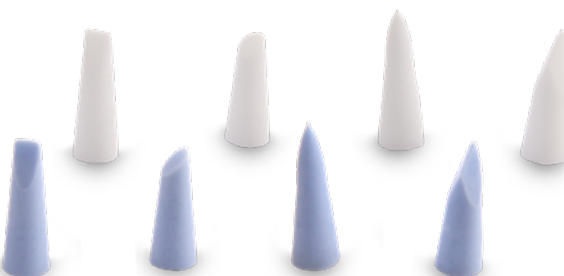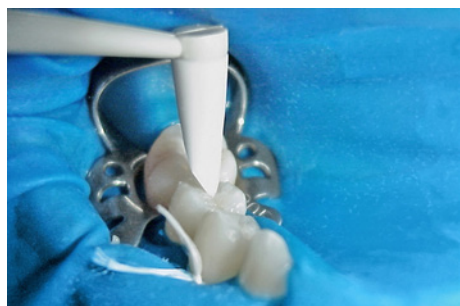

- シリコン製チップのため、コンポジットレジン形成時に、レジン離れも良く、滑らかな平滑面にすることができます。
- ハンドルおよびチップはオートクレーブ滅菌（126℃・16分）対応です。
- チップの硬さは、ソフトチップ（ホワイト）とハードチップ（ブルー）の2種類あり、形状は、4種類ありますので、コンポジットレジンの粘性や形状に合わせて、選択することができます。

ソフトチップ				ハードチップ			
フラット	シングルエッジ	ダブルエッジ	ポイント	フラット	シングルエッジ	ダブルエッジ	ポイント

TDV エステティックプラス キット

歯科医院様参考価格 ￥6,600

内容

- ・ハンドル（ユニバーサル・ストレート）各1本
- ・ソフトチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各1個
- ・ハードチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各1個

TDV エステティックプラス ソフトチップ アソート4個入

歯科医院様参考価格 ￥2,800

内容

- ・ソフトチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各1個

TDV エステティックプラス ハードチップ アソート4個入


歯科医院様参考価格 ￥2,800

内容

- ・ハードチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各1個

研磨ディスク

TDV プラクシス

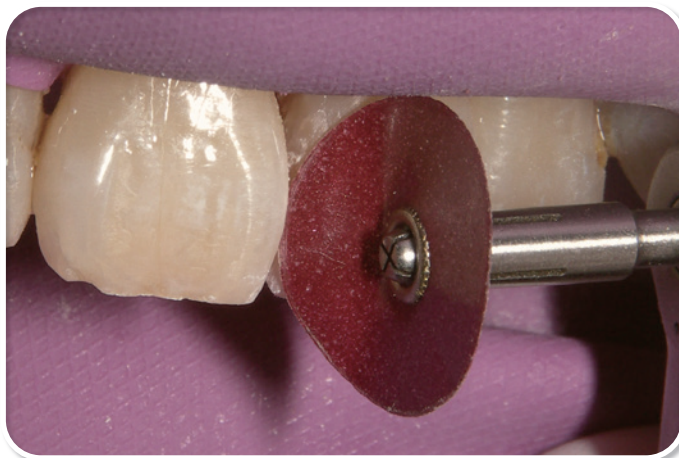2021年
6月21日(月)
新発売

臨床写真ご提供：医療法人ジニア ばんだ歯科 須崎 明 先生

- コンポジットレジン研磨用ディスクとマンドレルです。
- ディスクの厚みが薄く、フレキシブルなため、コンポジットレジン充填後の隣接面や湾曲した隅角部なども研磨することができ、支台歯形成時の調整などにも適しています。
- 近心面または遠心面などに応じて、ディスクの研磨面（片面）を反転させて、マンドレルに簡単に装着することができ、隣在歯を傷つけずに形態修正および研磨をすることができます。
- 研磨効率が高く、チェアタイムを短縮させることができます。

3/8インチ (9.5mm)				1/2インチ (12.7mm)				マンドレル
コース (粗) ブラウン	ミディアム (中粗) ローズ	ファイン (細) ピンク	エクストラファイン (極細) ホワイト	コース (粗) ブラウン	ミディアム (中粗) ローズ	ファイン (細) ピンク	エクストラファイン (極細) ホワイト	全長：25mm

※粗さは濃い色（目が粗い）から薄い色（目が細かい）に色分けされています。
 ※研磨ディスクは単回使用です。マンドレルはオートクレープ滅菌（126℃、16分）対応です。

TDV プラクシス アソートキット ご使用例



臨床写真ご提供：医療法人ジニア ばんだ歯科 須崎 明 先生

TDV プラクシス アソートキット

歯科医院様参考価格 ￥3,900

内容

- ・研磨ディスク
 - 3/8 インチ 各 5 枚
 - コース
 - ミディアム
 - ファイン
 - エクストラファイン
 - 1/2 インチ 各 10 枚
 - コース
 - ミディアム
 - ファイン
 - エクストラファイン
- ・マンドレル 1 本

1 枚あたり
約 ￥44

TDV プラクシス 研磨ディスク 30枚入

歯科医院様参考価格 各 ￥1,480

種類

- ・3/8 インチ コース
- ・3/8 インチ ミディアム
- ・3/8 インチ ファイン
- ・3/8 インチ エクストラファイン
- ・1/2 インチ コース
- ・1/2 インチ ミディアム
- ・1/2 インチ ファイン
- ・1/2 インチ エクストラファイン

1 枚あたり
約 ￥50

TDV プラクシス マンドレル 1本入

歯科医院様参考価格 ￥1,300



本紙に掲載されている価格は2021年6月のもの(税抜)です。
 形態・仕様は予告なく変更することがあります。

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器届出番号 13B2X10359160003

製造業者：TDV DENTAL LTDA (ティーディーイーデンタルエグジーディーイー社) 製造国：ブラジル

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020



株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は