

TDV 研磨ストリップ



TDV 研磨ストリップ 2.5mm×170mm 100 枚入

TDV 研磨ストリップ 4.0mm×170mm 100 枚入

歯科医院様参考価格

各 **¥2,500**

一般医療機器 歯科研削用ストリップ 医療機器届出番号 13B2X10359160004
製造業者：TDV DENTAL LTDA (ティーディーブイデンタルエルディーディーユー社)

ストリップ種類

2.5mm

4.0mm

ミディウム (グレー)
アルミナ粒子：52μm

中央部

ファイン (ホワイト)
アルミナ粒子：36μm

- ポリエステル製ストリップの片側にミディウム、反対側にファインのアルミナ粒子をコーティングした1枚で研削・研磨が可能なコンポジットレジン研磨ストリップです。
- ストリップ中央部はアルミナ粒子が付着していないため、コンタクトを傷つけずに歯間部に挿入させることができます。
- ストリップは、中央部厚さ 50μm、長さ 170mm、幅は 2.5mm と 4.0mm の 2 種類あり、4.0mm 幅は、コンポジットレジン修復後の隣接面を効率よく研削・研磨することができ、2.5mm 幅は、歯肉縁下などにも容易にアクセスし、修復物を研削・研磨することができます。

ご使用方法



両端部を保持し、修復物側に研削面を向けて、ストリップ中央部を歯間部に挿入します。



ミディウム (グレー) を使って修復物隣接面の研削を行います。



ファイン (ホワイト) を使って修復物隣接面の研磨を行います。

2.5mm 幅は
歯肉縁下にも
容易にアクセスします！



本紙に掲載されている価格は2022年2月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル



TEL. 0120-33-8020

FAX. 0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は