

# TDV ファイバーグラスバー



■レジン除去 ■接着材除去 ■セメント除去 ■ステイン除去

## アライナー用アタッチメントレジンの余剰部の除去例

アタッチメント設置直後

余剰部やバリの除去

施術後



余剰部やバリが発生している。



ファイバーグラスバーは、余剰部やバリなどを消しゴムのカスみたいに除去できる。



マイクロ下で、エナメル質上から慎重に余剰コンジットレジン除去した。

### アソートキット 6本入

歯科医院様参考価格 ¥3,900




内容:NO.1、NO.2、NO.3、NO.4、NO.5、NO.6 各1本入

### 単品：1本入

歯科医院様参考価格 ¥650




NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6

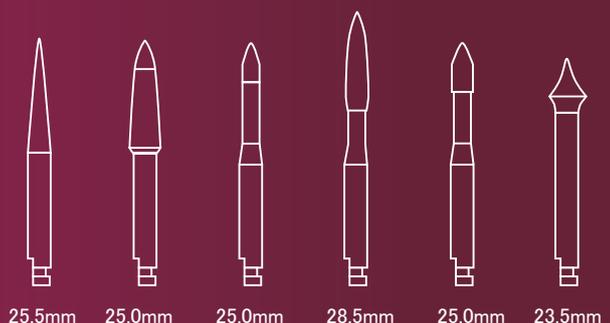

# TDV ファイバーグラスバー

TDV ファイバーグラスバーは、  
エナメル質をほとんど傷つけずに、  
歯面上からレジン等の残留物を効果的に除去する研磨用バーです。

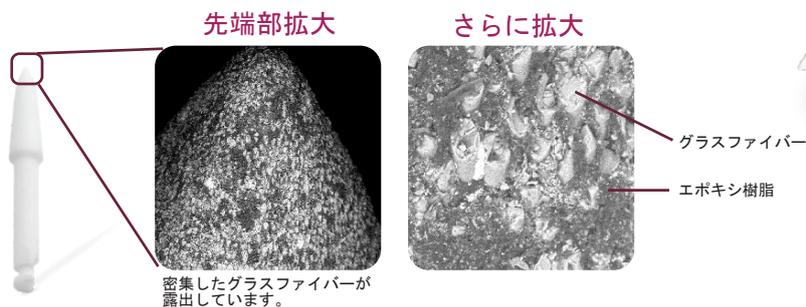


- シャープなグラスファイバーをエポキシ樹脂で固めています。  
研磨中、先にエポキシ樹脂が摩耗し、シャープなグラスファイバーが露出し続けますので、  
研磨作用が持続します。
- 研磨中にグラスファイバーは粉碎しますので、エナメル質をほとんど傷つけずに、  
レジン等の残留物を効果的に除去します。

## ご使用方法

- ① 選択した本品をコントラアングルに取り付けます。
- ② 5,000 ~ 10,000rpm の回転数で、注水しながら、軽い圧力にて使用します。  
※ 使用後は、中性洗剤等を用いて清掃してください。  
※ 洗浄液に浸漬させる場合は、製造元の指示に従った希釈液と浸漬時間に浸漬後、取り出し、  
10 秒間水洗し、水分を拭き取ります。  
※ 患者毎にオートクレーブ滅菌（126°C、16 分）を行います。 ※ 滅菌により本品の色が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

## ご使用例

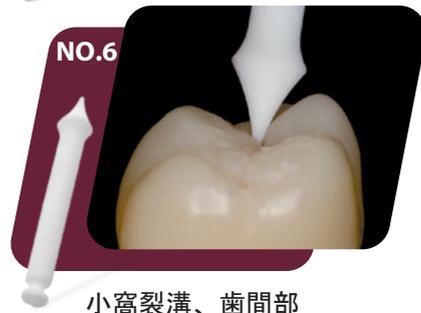

本紙に掲載されている価格は2023年3月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

 MORIMURA

株式会社 **モリムラ**  
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351  
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

● 製品に関するご用命は