

機械器具 67 歯科用防湿器  
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ (15712000)  
スタビライザーコード

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2.再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**



サイズ:太さ 1.8mm、長さ 2.1m

カラー:オレンジ

材質:熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)

**【使用目的又は効果】**

本品は、露出させた歯の歯頸部にラバーダムを押しえつめるために用いる。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

**【使用方法等】**

- 1.本品を必要な長さにカットする。
- 2.本品を歯間部に挿入し、ラバーダムを固定する。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	中華人民共和国
製造業者	Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)