

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ (15712000)
スタビライザーコード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



カラー	太さ	長さ
オレンジ	1.8mm	2.1m
*ブルー	*1.0mm	*2.1m

2. 材質:熱可塑性エラストマー樹脂 (TPE)

【使用目的又は効果】

本品は、露出させた歯の歯頸部にラバーダムを押さえつけるために用いる。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

【使用方法等】

1. *歯間部に合った適切な太さを選択し、必要な長さにカットする。
2. 本品を歯間部に挿入し、ラバーダムを固定する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
2. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造国 中華人民共和国
製造業者 Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd.
(タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)