

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)
シリジレット パウダー

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

名称	材質	性状	色
シリジレット パウダー (30 ミクロン)	酸化アルミニウム、 二酸化ケイ素	粉末	白

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、金属・レジン・ポーセレン等の研削に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を適量取り出します。
専用サンドブラスター(別売)のジャーに充填します。
- 2) 噴射する面を清掃し、乾燥させて下さい。
- 3) 適正噴射圧 2~3 気圧にて噴射します。
噴射する面に対して垂直に 5~10mm の距離を離して均一に噴射します。金属の場合は噴射した面の色が変わり、処理が確認できます。噴射する面の大きさにより、噴射時間を調整して下さい。
- 4) 噴射した後の面に残った粉末を清浄なエアードで 5 秒間噴射して除去して下さい。
- 5) 引き続き、噴射した後の面をシランカップリング材で処理します。処理方法につきましては、シランカップリング材の添付文書に記載されている使用方法等に従って下さい。

※専用サンドブラスター(別売)の添付文書をあわせてご参照ください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 取り出した後の本品は、本品の容器に戻さないこと。
- 2) 専用サンドブラスターのジャーに充填した本品は、専用サンドブラスター付属の穴なしジャー(パウダー保管用)等の密封できる容器に入れて保管して、早めに使い切るようにすること。
- 3) 噴射した面およびシランカップリング材にて処理した面は唾液などで汚染されないように注意すること。(接着力に影響するため。)

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 誤飲には十分注意すること。
 - ② 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵除去装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないようにすること。
 - ③ 保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散した本品から眼・鼻・口等を保護すること。
 - ④ 口腔内で使用する際は、必ずラバーダムを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 使用後は本品を湿気や汚染から保護するために、密封できる容器にて保管すること。
- 2) 直射日光、高温多湿を避けて室温にて保管すること。

[有効期間等]

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造業者 ZEST ANCHORS LLC
(ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国 アメリカ合衆国