

歯科材料 05 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材(31750002)

## GoTo システム

アシュアプラスユニドーズタイプ、GoTo ペースト カプセルタイプは再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 本品又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. アシュアプラスユニドーズタイプ、GoTo ペースト カプセルタイプは再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、歯面調整材、接着材から成る歯科矯正用ブラケット接着材セットである。

1. 本セットの構成成分、容器、形状、成分は以下に記載のとおり。

	構成成分	容器	形状	成分
歯面調整材	ウルトラセップ	ボトル	液状	GDMA-フォスフェート、エチルアルコール、HEMA、精製水、カンファーキノン、他
プライマー	アシュアプラス	ボトル ユニドーズ	液状	Bis-GMA、エタノール、HEMA、精製水、カンファーキノン、他
	ポーセレンコンディショナー	ボトル	液状	シラン、エタノール、アセトン、他
接着材	GoTo ペースト	シリンジ カプセル	ペースト	Bis-GMA、ストロンチウムガラス、カンファーキノン、他

2. 原理

歯面調整材にてエナメル質の処理後、プライマーを使用し粗造化された表面の濡れ性を向上させる等、接着に適した状態に改質する。接着予定の歯面がセラミックまたはポーセレンの場合は、専用のポーセレンコンディショナーを使用し接着性を高める。歯科矯正用装置にペーストを塗布し、光重合により硬化させてブラケットを歯面に固定する。

### 【使用目的又は効果】

歯列矯正用アタッチメント又は歯列矯正用帯環を歯又は歯科修復物に含着又は接着に用いる。

### 【使用方法等】

1. 歯面処理

- (1) 歯面をオイルやフッ素無配合の歯面研磨材で清掃し、水洗、乾燥、防湿をする。
- (2) ウルトラセップを一滴、ミキシングウェルに滴下する。
- (3) マイクロブラシで 5 秒間こすり塗りをする。ブラケットの接着面積より少し広めに塗布すること。
- (4) エアードで 2~3 秒乾燥させる。

2. プライマー処理

#### 【エナメル質にブラケットを接着する場合】

接着予定のエナメル質にアシュアプラスを一層塗布する。  
エアードで軽く乾燥する。

#### 【コンポジット、金属、暫間アクリルレジンにブラケットを接着する場合】

接着面をサンドブラスト処理し、水洗、乾燥する。  
アシュアプラスを一層塗布する。  
エアードで軽く乾燥し、10 秒間(500mW/cm<sup>2</sup>)照射する。

#### 【接着予定の被着面がセラミックまたはポーセレンの場合】

接着面をサンドブラスト処理し、水洗、乾燥する。  
ポーセレンコンディショナーを一層塗布し、2 分間後、エアードで完全に乾燥させる。  
アシュアプラスを一層塗布する。  
エアードで軽く乾燥し、10 秒間(500mW/cm<sup>2</sup>)照射する。

3. ブラケットの接着

GoTo ペーストをブラケットの接着面に塗布し、歯面の接着部位に圧着する。10 秒間(500mW/cm<sup>2</sup>)照射する。ペーストは、ブラックライト下で蛍光色になるため識別が容易である。

### 【ブラケットを除去する場合】

リガチャーカッターを使用し、ブラケットとエナメル質の境界線で接着材を掴み、ブラケットを歯面から外す。歯面に残った接着材は、研磨で取り除く。

### 【使用法に関連する使用上の注意】

- ・ウルトラセップの使用後はボトルのキャップを元に戻すこと。
- ・アシュアプラスボトルタイプの使用後は、揮発を防ぐため、直ちにキャップを閉めること。
- ・口腔内でサンドブラスト処理を行う際は、ラバーダム防湿を行うこと。
- ・歯面処理に、汎用リン酸エッチング材を使用する場合は、その製造業者の指示に従って適用すること。

### 【使用上の注意】

#### 【使用注意】

1. 他の製品と混合して使用しないこと。
2. 誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合には、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
3. アシュアプラス、GoTo ペーストは窓際又はライト直下等、明るい場所で硬化することがあるため、強い光の当たらない場所で使用すること。
4. 接着材使用時に照射器を使用する際には、保護メガネ等を使用すること。

#### 【重要な基本的注意】

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
2. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
3. 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
4. 本品を皮膚に付着させたりしないように注意すること。皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と流水で十分に洗浄すること。その他軟組織に付着した場合は、速やかに大量の水で数分間洗い流すこと。
5. 万一、目に入った場合はすぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。
6. アシュアプラスユニドーズタイプ、GoTo ペースト カプセルタイプは再使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・ウルトラセップ  
冷蔵庫にて 2~8℃で保管すること。

- ・アシュアプラス
- ・ポーセレンコンディショナー
- ・GoTo ペースト

直射日光、高温多湿を避け、15~30℃の暗所にて保管すること。

#### 【使用期限等】

構成成分の包装に記載の使用期限までに使用すること。  
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Reliance Orthodontic Products, Inc. (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社)
製造国	アメリカ合衆国(USA)