

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント **+**

愛顧キャンペーン!

第7弾

# スマイルデントプラス泡クリーナー 詰替用・プレゼント

限定 3,000 本 2025 年 4 月 21 日 (月) ~ 2025 年 6 月 19 日 (木)

スマイルデントプラス  
120錠 4個 お買い上げで



スマイルデントプラス  
泡クリーナー  
詰替用 1本  
プレゼント



詰替用

詰替用に  
ポンプ&キャップ  
(非売品)を  
サービス!!



装着イメージ  
詰替用に  
ポンプ&キャップを  
装着すれば  
ポンプ付と  
同じように  
ご使用できます!



スマイルデントプラス  
48錠 6個 お買い上げで



さわやかな  
ミントの香り

入れ歯のニオイが気になる場合

ご使用例

朝・昼はお手軽な泡タイプで洗浄し、夜は錠剤タイプでしっかりと浸けおき洗浄!

# スマイルデントプラス

## スマイルデントプラス 入れ歯洗浄剤



トリプル除菌剤配合の入れ歯洗浄剤です。  
部分入れ歯・総入れ歯、ノンクラスプ入れ歯兼用です。

120錠



部分入れ歯

総入れ歯

ノンクラスプ入れ歯

48錠



### ■ トリプル除菌剤配合

- **Ag<sup>+</sup>** アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。
- **CPC** 塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。
- **IPMP** イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で、歯磨剤などにも使用されています。

### ■ 防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)配合

金属への変色等を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。  
※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

### ■ ご使用方法

- ① 約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。
- ② すぐに入れ歯を浸してください。  
※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
- ③ 洗浄後は水でよくすすいでください。

## スマイルデントプラス 泡クリーナー

きめが細かく、立体感のある泡タイプの洗浄剤です。  
部分入れ歯、総入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナー兼用です。

ポンプ付



詰替用



部分入れ歯

総入れ歯

マウスピース

リテーナー

さわやかな  
ミントの香り

150mL

約180プッシュ分

### ■ W除菌剤配合

- **CPC** 塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。
- **IPMP** イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で、歯磨剤などにも使用されています。

### ■ 研磨剤 & 着色料無配合

入れ歯、マウスピース等にキズをつけず、  
マウスピース等に色移りの恐れがありません。



### ■ ご使用方法

- ① 入れ歯、マウスピース、リテーナーを流水で軽く洗浄します。
- ② ボトルをよく振った後、キャップを外して、入れ歯、マウスピース、リテーナー全体に泡が覆うように、1~2プッシュします。
- ③ やわらかいブラシで、約1~2分こすり洗いをします。
- ④ 入れ歯、マウスピース、リテーナーを流水でよく洗浄してください。

形態・仕様は予告なく変更することがあります。