

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ (15712000)
プラスチッククランプ

【禁忌・禁止】

1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
Z1	小臼歯 
Z2	大臼歯 
Z4	大臼歯 
Z22	ショート 
Z21	ロング 

材質:PEEK

【使用目的又は効果】

本品は、露出させた歯の歯頸部にラバーダムを押さえつけるために用いる。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

【使用方法等】

- 適切なクランプを選択する。
- フォーセプスでクランプを保持し、口腔内に挿入する。
- ラバーダムが正しく装着された歯牙の歯頸部を、頬側と舌側からウィングで挟み、ラバーダムを固定する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 破損を避けるため、1cm 以上開かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

[使用前の点検]

使用前に点検し、破損・変形・異物混入などの異常がある場合は使用しないこと。

[滅菌条件等]

滅菌バックに入れ、オートクレーブ滅菌(134℃で5分)すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造国 中華人民共和国
製造業者 Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd.
(タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)