

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)
* (歯科用ゴム製研磨材 (70903000)、歯科用マンドレル (35170000))
Z T ポリッシャー

ワンステップ、ディスクは再使用禁止

【禁忌・禁止】

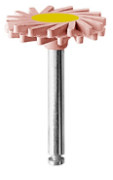
1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. ワンステップ、ディスクは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. ツイスト

種類	ミディウム	
	**14mm	**11mm
		
	ファイン	
	**14mm	**11mm
		
材質	研磨部:ダイヤモンド、TPU マンドレル:真鍮(金メッキ)	
推奨回転数	3,000～8,000rpm ** (最大 10,000rpm)	
*用途	コンポジットレジン研磨	

*2. セラツイスト

種類	コース	ミディウム	ファイン
			
材質	研磨部:ダイヤモンド、TPU マンドレル:ステンレス鋼 303		
推奨回転数	7,000～12,000rpm (最大 20,000rpm)		
用途	セラミックの研磨		

*3. コンポジットポリッシャー

種類	ミディウム			
	ポイント	ミニポイント	カップ	コーン
				
	ファイン			
	ポイント	ミニポイント	カップ	コーン
				
材質	研磨部:ダイヤモンド、TPU マンドレル:真鍮(金メッキ)			
推奨回転数	8,000～12,000rpm			
用途	コンポジットレジン研磨			

**4. マルチツイスト

種類	ミディウム 11mm	ファイン 11mm
		
材質	研磨部:ダイヤモンド、TPU マンドレル:ステンレス鋼 303	
推奨回転数	3,000～8,000rpm (最大 10,000rpm)	
用途	コンポジットレジン及びセラミックの研磨	

5. ディスク (単回使用)

種類	コース (荒)	ミディウム (中荒)	ファイン (細)	スーパーファイン (極細)
				
サイズ	直径 9.5mm / 12.7mm			
材質	ディスク:PET、アルミニウム、酸化アルミニウム			
推奨回転数	7,000～10,000rpm			
*用途	コンポジットレジン研磨			

6. マンドレル



材質:ステンレス鋼 303

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

*1. ツイスト、セラツイスト、コンポジットポリッシャー、マルチツイスト

(1) 歯科用ハンドピース等に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に補綴物等に押し付けて、研磨する。

2. ディスク

- (1) ディスクをマンドレルに確実に固定されるまでゆっくり押し込む。
- (2) ディスクは、コース(荒)、ミディウム(中荒)、ファイン(細)、スーパーファイン(極細)の順で使用する。
- (3) ソフトタッチで断続的に補綴物等に押し付けて使用する。常に同一方向に向かって研磨を行うこと。
- (4) 使用後はディスクをマンドレルから取り外す。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ディスクは専用のマンドレルを使用すること。
- ・推奨回転数を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- *1. ディスクは単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
2. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
3. 過度の発熱は歯髄に影響が出るため、回転数や使用時間を適切に調節すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。
- *腐食性物質と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

[使用前の点検]

使用前に点検し、破損・変形・異物混入などの異常がある場合は使用しないこと。

[滅菌条件等]

****・ツイスト、セラツイスト、コンボジットポリッシャー、マルチツイスト、マンドレル**
滅菌パックに入れ、オートクレーブ滅菌(134℃で5分)すること。

※ツイスト、セラツイスト、コンボジットポリッシャー、マルチツイストは、アルコールや酵素系洗浄剤に浸漬しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	中華人民共和国
製造業者	Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)