

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド (16195000)
Z T マトリックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2.再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	中華人民共和国
製造業者	Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)

【形状・構造及び原理等】

1.メタル

種類	*タブなし 4.5mm	*タブなし 5.5mm	*タブなし 6.5mm
			
	*タブ付 4.5mm	*タブ付 5.5mm	*タブ付 6.5mm
			
厚さ	38 μ		
材質	ステンレス鋼 304		

2.ストリップロール



サイズ:幅 9.5mm、厚さ 50 μ 、長さ 15m
材質:PET

【使用目的又は効果】

本品は、修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるために用いる。

【使用方法等】

- 1.適切なマトリックスを選択する。
※ストリップロールは必要な長さにカットする
- 2.マトリックスを適切な隣接する歯間に通し、適切な方法で固定する。
- 3.修復後、マトリックスを取り外す。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

*腐食性物質と一緒に保管しないこと。