

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料（70883000）

PERFIT シリコンバイト

【禁忌・禁止】

- 本品及び類似成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造・構成品

構成	成分	性状	色調
ベース	ポリビニルシロキサン、 架橋剤、二酸化ケイ素、そ の他	ペースト状	水色
キャタリスト	ポリビニルシロキサン、 白金触媒、二酸化ケイ素	ペースト状	白色

2. 原理：

化学重合により硬化する。

【使用目的又は効果】

修復物等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録するために用いる。

〔品目仕様等〕

ショア A 硬度	89
作業時間	12 秒
口腔内保持時間	45 秒

※操作環境が高い温度下では上記時間は短くなり、低い温度下では時間が長くなる。

【使用方法等】

- 本品にカートリッジディスペンサー（別売）を装着し、キャップを取り外す。
- ペーストの試し出しを行い、2 種のペースト（ベースとキャタリスト）が均等に吐出されていることを確認する。
- ミキシングチップ（別売）を確実に装着する。
- カートリッジディスペンサーを操作し、本品を咬合面に填入し咬合させて硬化を待つ。
- 硬化後、口腔内より撤去した印象は、血液、唾液等を十分に洗浄した後、必要に応じて消毒を行う。
- 印象を乾燥させ、余剰部分をナイフ等でトリミングする。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

・本品の硬化に影響を与える可能性があるため、使用の際には、天然ゴム製の手袋を使用しないこと。ビニール袋の手袋を使用して下さい。

・本品は容器のキャップを取ったままで置かないこと。使用後は必ずミキシングチップを外し、キャップを確実に閉めて保管すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 他の製品と混合して使用しないこと。
- 本品にミキシングチップが確実に装着されていることを確認し、カートリッジディスペンサーのプランジャーを必要以上の力で押さないこと。もしプランジャーの押し込みに抵抗がある場合には、本品を一旦取り外して点検すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

直射日光、高温多湿を避け 5～25℃の暗所に保管すること。

〔使用期間等〕

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話 03-5808-9350
製造業者 Shandong Huge Dental Material
Corporation (シャントング ヒュージ デンタル マテリア
ル コーポレーション)
製造国 中華人民共和国