

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
シリンジチップ 2 3 G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

外観	用途
	スーパーエッチジェル用

シリンジチップ 2 3 G:先端部外径 0.6mm

＜材質＞先端部：ステンレス鋼
接続部：プラスチック

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は口腔内で充填材又は修復材等を適用するために用いる歯科用シリンジチップである。

【使用方法等】

＜シリンジへの装着方法＞

ご使用になるシリンジに本品を回転させながらしっかりと装着します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本品がシリンジにしっかりと装着されていることを確認すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 無理な角度、過度の加圧での使用はしないこと。
- ② 再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
*電話番号	03-5808-9350
製造業者	SDI Limited (SDI 社)
製造国	オーストラリア