

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具（38782000）
ポインツ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1.形状

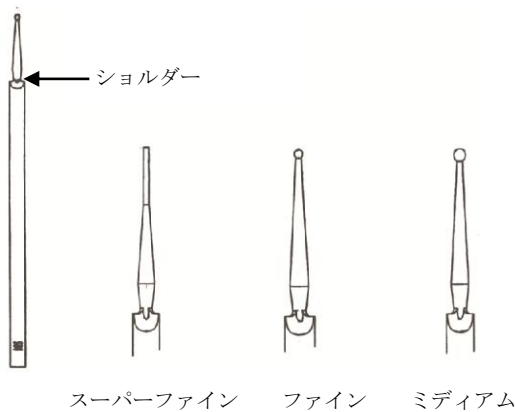

名称	ロッド識別色	チップ径
スーパーファイン	パープル	0.6mm
ファイン	ダークグリーン	0.8mm
ミディアム	ダークブルー	1.2mm

2.材質

ポリプロピレン、ナイロン

【使用目的又は効果】

1.使用目的

本品は、口腔内で充填材又は修復材等を適用するために用いるアプリケーションターである。

2.用途

- ・シーラント、ボンディング、エッチング、ライナー、歯垢染色液等の塗布
- ・築造過剰レジンの除去

【使用方法等】

- ①使用部位、目的に合わせ、根元の部分でハンドルを曲げます。
- ②本品の先端チップに材料を浸し、所要部位に塗布します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1.本品は材料ごとに使い分けてください。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.使用には十分注意を払うこと。
- 2.ショルダー部で曲げる際には、無理な角度付け、過度の加圧での使用は避けること [折損することがあるため]。
- 3.使用後は、感染防止等に配慮して安全な方法で処分すること。
- 4.再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温（但し結露しない。特に水濡れに注意すること）にて、保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ

*電話番号 03-5808-9350

製造業者 SDI Limited（SDI 社）

製造国 オーストラリア