

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ (16370000)
Z T ウェッジ


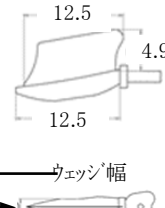


再使用禁止

【禁忌・禁止】

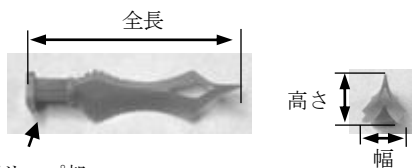
- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2.再使用禁止。






【形状・構造及び原理等】

1.メタルガード

| 種類 | *形状 | *寸法(mm) | *ウェッジ幅 |
|-----------|---|--|--------|
| S グリーン |  | <div>ガード部厚さ 0.08</div>  | 1 |
| M オレンジ |  | | 1.4 |
| L パープル |  | | 1.7 |
| 材質 | ガード部:ステンレス鋼 304、ウェッジ部:POM | | |

*2. Z T ダイヤウェッジ



| 種類 | 形状 | 寸法(mm) | | |
|--------------|---|--------|------|-----|
| | | 全長 | 幅 | 高さ |
| ES イエロー |  | 16.7 | 1.75 | 2.2 |
| S ブルー |  | 16.9 | 2.6 | 2.8 |
| M オレンジ |  | 17.5 | 3.5 | 3.1 |
| L グリーン |  | 17.5 | 4.2 | 4.5 |
| ディープ パープル |  | 17.5 | 3.5 | 3.1 |
| 材質 | POM | | | |

3.アダプティブ

|  | サイズ | 材質 |
|---|-------------------|--------|
| | 長さ 16mm 太さ 3mm | PP、TPR |

【使用目的又は効果】

本品は、充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるために歯頸部に設置する。

【使用方法等】

1.メタルガード

- (1)適切な種類のウェッジを選択する。
- (2)修復する歯の歯頸部の歯間に差し込む。
- (3)形成後、ウェッジを歯間から抜き取る。

*2. Z T ダイヤウェッジ、アダプティブ

- (1)修復する歯牙の隣接面に配置されたマトリックスを固定するように、ウェッジを挿入する。
- (2)修復後、歯間から抜き取る。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造国 中華人民共和国
製造業者 Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd.
(タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)