

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
(歯肉圧排材料 (70882000))
ブルーテフロンテープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2.再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



サイズ:幅 13mm、厚さ 0.1mm、長さ 5m

カラー:ブルー

材質:テフロン(ポリテトラフルオロエチレン)、色素

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内で充填材又は修復材等を適用する際に用いる。
また、歯肉を圧排するために一時的に用いる。

【使用方法等】

1.隣在歯隔離

- (1)ケースの刃で、本品を必要な長さにカットする。
- (2)本品を歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付ける。

2.歯肉圧排

- (1)ケースの刃で、本品を必要な長さにカットする。
- (2)テープを糸状にし、歯肉圧排器具等を用いて、歯肉溝に挿入する。
- (3)圧排が得られた後、テープを歯肉溝から除去する。

[使用方法における使用上の注意]

使用後は本品を口腔内から取り外すこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 3.補綴物作成時、本品をインプラントのアクセスホール等の封鎖に使用する場合は、作成後、補綴物から本品を取り除いてください。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	中華人民共和国
製造業者	Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)