

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具（38782000）
Z T リングプライヤー

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)
製造国	中華人民共和国

<原理>

先端部を歯科用マトリックスリテイナに合わせ、グリップ部を握ることにより、歯科用マトリックスリテイナを広げる。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は口腔内で修復材又は成形器具を取り付けるために用いる歯科器具である。

【使用方法等】

<装着する時>

1. 本品[Z T リングプライヤー]の先端部を歯科用マトリックスリテイナ（製品名：Z T リング）又は歯間分離器（製品名：Z T セパレーター）に合わせる。
2. 本品のグリップを持ち、歯科用マトリックスリテイナ（製品名：Z T リング）又は歯間分離器（製品名：Z T セパレーター）の把持部を広げる。
※広げ過ぎに注意すること。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①使用の際は、必ずラバーダムを装着すること。
- ②歯科用マトリックスリテイナ（製品名：Z T リング）又は歯間分離器（製品名：Z T セパレーター）は、広げ過ぎに注意すること。広げ過ぎにより元の状態に戻らなかったり、十分に機能しなくなる場合がある。また、使用回数、時間と共に劣化するので、その際には交換すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品の使用にあたっては、滅菌された状態で使用すること。
- ②無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

2) 重要な基本的注意

- ①本品の使用にあたっては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認を行うこと。
- ②正常かつ安全に作動すること等を確認するため、後述の方法に従って保守点検を行うこと。
- ③使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光を避け、腐食性物質と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

[清掃・洗浄・滅菌条件等]

- 1) 本品は使用後、中性洗剤にて洗浄、乾燥後、滅菌パックに入れ、オートクレーブ滅菌（134℃、3～5 分間）を行い、乾燥させること。