




クアドラ・ラバーダムフレーム

CUZOR

前歯部審美修復治療に特化した特殊設計

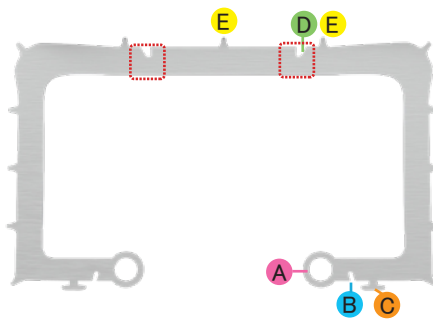

- A 上顎歯結紮用ホール
- B 上顎歯結紮用ノッチ
- C 上顎歯結紮用フック
- D 下顎歯結紮用ノッチ
- E 突起部
- ベンディング可能部位



顔に沿わせて折り曲げて※ 使用も可能
※30° まで




臨床写真ご提供：東北大学歯学部研究科 分子・再生歯科補綴学分野 河阪 幸宏 先生

- ダイレクトレストレーション、ラミネートベニアなど、前歯部の審美修復治療時の歯頸部圧排を容易にする特殊設計のラバーダムフレームです。
- 6 インチのラバーダムシートに適したフレームサイズのため、シート幅を余剰なく伸長させて固定させることができます。これにより、シートのズレ、たるみを防ぎ、術者は治療に集中することが可能です。
- 歯頸部のフロス結紮のためのアンカー機構（ホール、ノッチ、フック）を付属しています。

クアドラ・ラバーダムフレーム 新発売キャンペーン

期間：2026年10月21日（水）～12月17日（木）

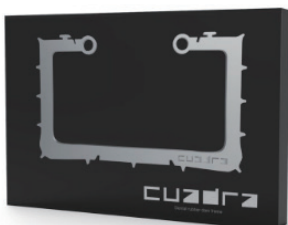

仕様

- ・寸法：縦 93mm、横 159mm、厚み 1mm
- ・重量：35g
- ・材質：ステンレス鋼
- オートクレーブ滅菌可（134℃、4分間）

歯科医院参考価格

¥10,000 ▶


特別価格

にてご提供いたします


前歯、単歯、片顎の適切な穿孔位置をラバーダムシートに印記できる
POPでキュートな歯科用ラバーダムテンプレート




PAC-DAM テンプレート

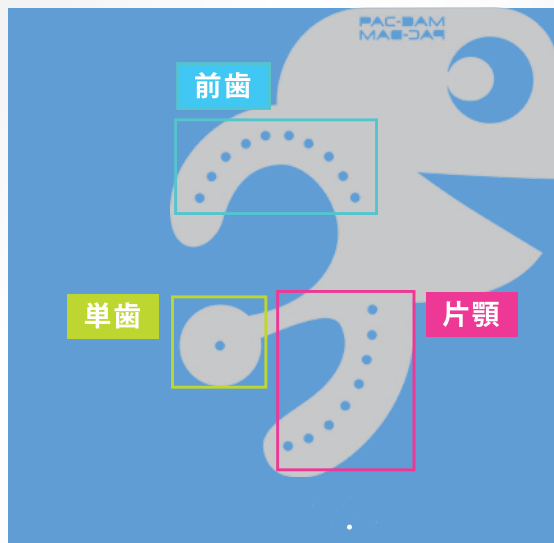

PAC-DAMの穴の直径は2.5mmで
穴間隔は上下顎2.5～4mmに設定されています。

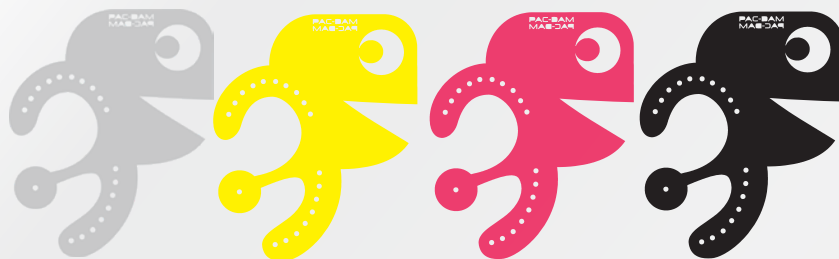

PAC-DAMテンプレート使用後の穿孔

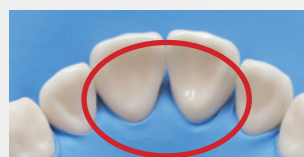

PAC-DAMテンプレートを使用することで、
ラバーダムシートの適切な位置を穿孔することができ、
唾液による汚染を防止することができます。






使用方法

①右図を参考に、ラバーダムシートの
のコーナーに、PAC-DAM テン
プレートのコーナーを合わせます。

- 1: $\frac{5+5}{6} \frac{1 \sim 8}{1 \sim 8}$ シートの右上
- 2: $\frac{5+5}{8 \sim 1} \frac{6}{6}$ シートの左上
- 3: $\frac{5+5}{6} \frac{1 \sim 8}{1 \sim 8}$ シートの右下
- 4: $\frac{5+5}{8 \sim 1} \frac{6}{6}$ シートの左下

②隔離する歯牙の部位を先端の尖った
鉛筆やペンで印記します。

③印記した部位をラバーダムパンチ
で穿孔します。

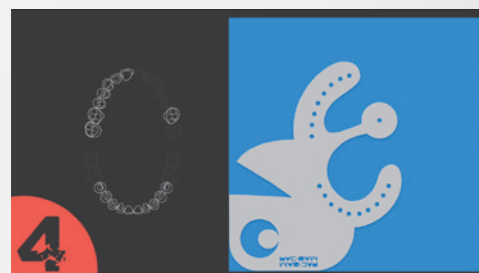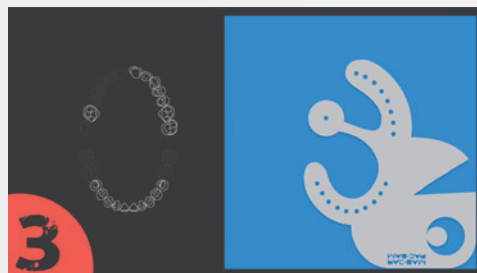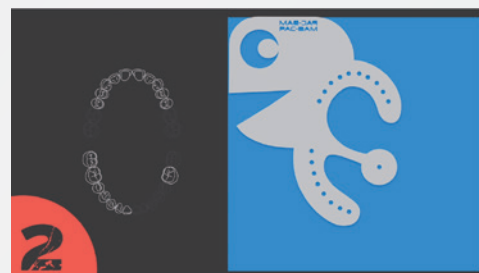


PAC-DAM テンプレート メタル

色調: シルバー

※厚さ: 1 mm
重さ: 48 g

歯科医院参考価格 **¥8,400**

・PAC-DAM テンプレート メタルは、薬液消毒およびオートクレーブ滅菌
(134℃、4 分間) が可能です。

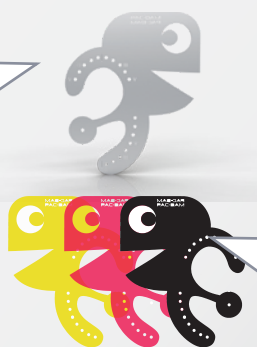

PAC-DAM テンプレート プラスチック

色調: イエロー・ピンク・マットブラック

※厚さ: 3 mm
重さ: 22 g

歯科医院参考価格 **¥5,600**

・PAC-DAM テンプレート プラスチックは、薬液消毒が可能です。
※ 薬液消毒を行う場合は、薬液の製造業者の指示に従って消毒を
行ってください。

本紙に掲載されている価格は2026年10月21日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は